

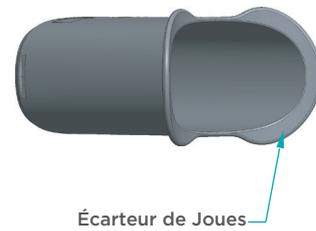
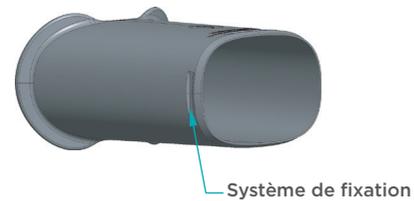
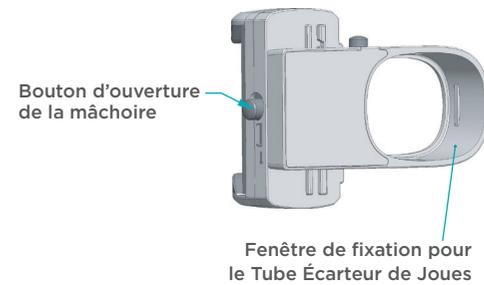



Votre ScanBox^{pro} en détail

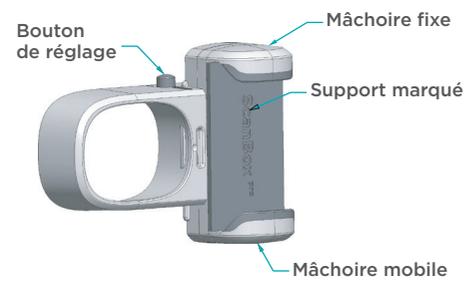

ScanBox^{pro} vue de face après assemblage avec votre smartphone.

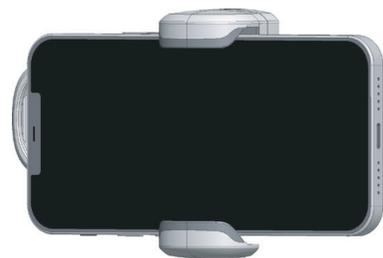

ScanBox^{pro} vue de dos après assemblage avec votre smartphone.

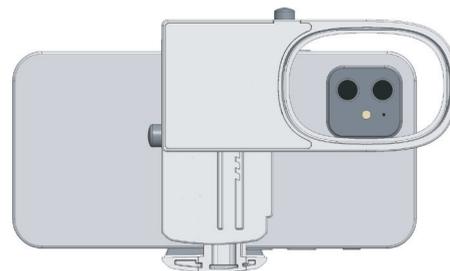

DentalMonitoring

dental-monitoring.com

L'application DentalMonitoring est disponible sur l'App Store et Google Play




DentalMonitoring[®] est un produit conçu et fabriqué par Dental Monitoring[®] SAS, sous la marque DentalMind[®] pour les professionnels de la santé (PS). Il est également utilisé par les patients sous la surveillance médicale des professionnels de la santé (PS). DentalMonitoring[®] est conçu pour aider les PS à observer et monitorer à distance les situations intra-orales et les traitements orthodontiques. Consultez votre PS et/ou les consignes d'utilisation avant de les utiliser. DentalMonitoring[®] est un dispositif médical (en Europe uniquement), enregistré en tant que tels et portant la marque CE. La disponibilité du produit, ses revendications et son statut peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales. Contactez votre représentant local pour de plus amples informations.

AD_MON_BR_022_01_pr_P_FR_fr



Comment utiliser votre ScanBox^{pro}

1 / Ouvrez votre application DM

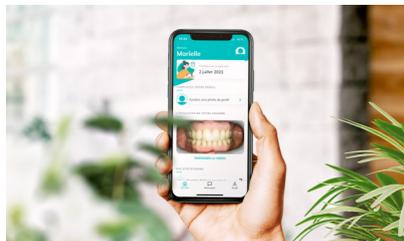

Avant de chaque scan, pensez à vous laver soigneusement les mains à l'eau et au savon.

Face à un miroir, ouvrez votre application DM et assurez-vous que votre smartphone n'est pas en mode silencieux.

2 / Utilisez un Tube Écarteur de Joux adapté à votre bouche

À FAIRE

Utilisez toujours un Tube Écarteur de Joux adapté à la taille de votre bouche. Si celui qui vous a été conseillé n'est pas confortable, parlez-en à votre praticien.

À NE PAS FAIRE

N'utilisez pas un Tube Écarteur de Joux trop petit car toutes vos dents ne seraient pas visibles.

N'utilisez pas un Tube Écarteur de Joux trop grand car cela pourrait être douloureux.

3 / Placez votre smartphone dans le support de téléphone



Ajustez la fenêtre en faisant glisser le support verticalement jusqu'à ce que l'objectif et le flash de votre smartphone soient bien centrés. Pour ceci, appuyez sur le second bouton de réglage.

À NE PAS FAIRE

N'insérez votre smartphone à l'envers.



À FAIRE

Tenez le support de téléphone avec l'inscription DM gravée face à vous.

Ouvrez la mâchoire du support de téléphone en appuyant sur le bouton du côté et placez le dos de votre smartphone, sans housse de protection, contre le support, de sorte que le flash et l'objectif de l'appareil soient alignés à la fenêtre.

Refermez fermement la mâchoire du support pour que votre smartphone soit correctement maintenu et qu'il ne puisse pas tomber.

4 / Assemblez le Tube Écarteur de Joux et le support de téléphone

À FAIRE

Insérez le Tube Écarteur de Joux dans le support de téléphone. Vous entendrez un clic lorsqu'il sera bien en place.

À NE PAS FAIRE

Utiliser plusieurs Tubes Écarteur de Joux.

Insérer le mauvais côté du Tube Écarteur de Joux dans le support de téléphone.



5 / Placez le Tube Écarteur de Joux dans votre bouche



À FAIRE

Insérez le Tube Écarteur de Joux dans votre bouche en commençant par un côté, puis l'autre. Vos dents et vos gencives doivent être bien visibles et vous ne devez pas ressentir de douleur.



À NE PAS FAIRE

Ne pas mordre le Tube Écarteur de Joux. Son rôle est de maintenir vos lèvres écartées de vos dents.

Ne pas laisser le Tube Écarteur de Joux à l'extérieur de votre bouche. Vous devez l'y insérer avant de démarrer votre scan.

Pour toutes vos questions concernant DentalMonitoring ou vos scans, votre praticien et son équipe sont vos premiers contacts car ils vous connaissent et savent précisément comment votre traitement évolue. Vous pouvez leur envoyer un message via votre application. Pour toute question technique concernant l'application, notre service support DentalMonitoring est disponible pour vous guider. Vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : support@dental-monitoring.com

6 / Tapez deux fois sur l'écran pour commencer votre scan



À FAIRE

Pensez à faire des mouvements très amples, d'un côté puis de l'autre afin que toutes vos dents, y compris celles du fond de votre bouche, soient visibles.

Votre mouvement doit rester centré avec la ScanBox pro bien droite.

Scannez votre bouche au rythme de la jauge sur l'écran de votre smartphone. Ni trop vite, ni trop lentement.



À NE PAS FAIRE

Votre langue ne doit pas rester devant vos dents.

7 / Ecoutez attentivement les instructions de l'application

Les positions suivantes peuvent vous être demandées selon votre traitement :



Bouche légèrement ouverte

Laissez l'espace de votre langue environ entre vos dents supérieures et inférieures.



Bouche fermée

Vos dents doivent être serrées, vos lèvres écartées pour dégager toutes vos dents.



Bouche grande ouverte

Ouvez votre bouche le plus grand possible tout en maintenant le Tube Écarteur de Joux en place.

Prenez votre temps lorsque vous vérifiez vos scans. Si vos photos ne correspondent pas aux exemples de votre écran, reprenez-les. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, validez et envoyez votre scan.